

EcoVue®

Sterile Ultrasound Gel HV Sterile Ultrasound Gel

SV

REKOMMENDERADE FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Förvara på en ren, torr plats vid rumstemperatur och borta från direkt solljus.

Bruksanvisning

REF

280	20 g paket med SafeWrap®-förpackning
280NW	20 g paket

380	20 g paket med SafeWrap®-förpackning
380NW	20 g paket

BESKRIVNING

EcoVue® Sterile Ultrasound Gels är sterila, icke-irriterande, icke-sensitiserande, icke-färgande och vattenlösliga scanninggels avsedda att användas under sterila ultraljudsprocedurer. Gel är ett tillbehör som används för att leda ljudvågor mellan en patient och medicinsk avbildningsutrustning under ultraljudsprocedurer inom hälsovården. EcoVue Sterile Ultrasound Gels kan användas med alla kommersiellt tillgängliga ultraljudsapparater.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

EcoVue Sterile Ultrasound Gels kan användas under ultraljudsprocedurer på alla patientpopulationer där sterilitet är föreskrivet eller önskvärt, eller under procedurer där risken för korskontaminering måste beaktas.

KONTRAINDIKATIONER

Inga.

VARNINGAR

- Om irritation uppstår, avbryt användningen och uppsök läkare.
OBSERVERA: Alla allvarliga incidenter som uppstår i relation till denna produkt ska rapporteras till HR HealthCare och behörig myndighet i medlemsstaten där användaren är etablerad.
- EcoVue Sterile Ultrasound Gels är avsedda endast för engångsbruk. Återanvändning kan orsaka korskontaminering, risk för infektion eller negativ reaktion hos patienten.
- OBSERVERA:** Enligt federal lagstiftning får denna utrustning endast användas av eller på order av läkare eller dennes representant.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Kassera och använd inte EcoVue Steril Ultrasound Gel om förpackningen är skadad eller öppnad.
- För att reducera risken för korskontaminering, ska standardiserade sterila procedurer användas.

FÖRE ANVÄNDNING, HANDHAVANDE & INSPEKTION

- EcoVue Sterile Ultrasound Gel ska inspekteras ordentligt före användning för att säkerställa att förpackningen inte är skadad eller defekt.
- För att reducera risken för korskontaminering, ska standardiserade sterila procedurer användas.

GELUPPVÄRMNING

EcoVue Sterile Ultrasound Gel kan användas vid rumstemperatur eller värmas upp i en ultraljudsgelvärmare oavsett förpackningsformat, såsom gelvärmaren Acclimate®. Se gelvärmarens bruksanvisning/ användarmanual från tillverkaren för uppvärmningsinstruktioner.

STEGVISA ANVISNINGAR

- Ta bort SafeWrap-ytterpåsen (i förekommande fall).
- Öppna manuellt paketet genom att riva längs perforeringarna enligt indikering.
- Lägg på önskad mängd EcoVue direkt på patienten eller sonden efter behov.
- Kassera paketet efter användning.



HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com



Emerge Europe
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Anhem
The Netherlands



Imaging Solutions Pty Ltd
PO Box 3225 Loganholme DC,
QLD, 4129
Australia



Nissha Medical Technologies Ltd
Torbay Business Park, Woodview Rd.
Paignton, Devon, TQ4 7HP

Nissha Medical Technologies SAS
23-25 Boulevard de la Paix
95800 Cergy, France



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, EcoVue, FlexPac och Acclimate är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HR HealthCare. © 2018-2025 HR HealthCare. Alla rättigheter reserverade.

LBL-0120-SV Rev. 0 (04/2025)

HR HealthCare

Bruksanvisning

REF

281	20 g paket
283	32 g FlexPac®-påse
284	60 g tub med fällock
286	250 ml Flaska

381	20 g paket
383	32 g FlexPac®-påse
386	250 ml Flaska

BESKRIVNING

EcoVue® Non-Sterile Ultrasound Gel är icke-steril, icke-irriterande, icke-sensitiserande, icke-färgande och vattenlöslig gel avsedd att användas som scanningsgel i diagnostiska och terapeutiska procedurer med ultraljudsgel. Gel är ett tillbehör som används för att leda ljudvågor mellan en patient och medicinsk avbildningsutrustning under ultraljudsprocedurer inom hälsovården. EcoVue Sterile Ultrasound Gels kan användas med alla kommersiellt tillgängliga ultraljudsapparater.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Engångsförpackningar med EcoVue Non-Sterile Ultrasound Gel (REF # 281, 283, 381 och 383) är avsedda att användas på inrättningar där det föreligger risk för korskontaminering för alla patientpopulationer under icke-invasiva ultraljudsprocedurer på intakt, obruten hud.

Flergångsprodukter med Non-Sterile Ultrasound Gel (REF # 284, 286, 386 och 383) är avsedda att användas på inrättningar där det finns minimal risk för korskontaminering för alla patientpopulationer under icke-invasiva ultraljudsprocedurer på intakt, obruten hud.

KONTRAINDIKATIONER

Inga.

VARNINGAR

- Om irritation uppstår, avbryt användningen och uppsök läkare.
- OBSERVERA:** Alla allvarliga incidenter som uppstår i relation till denna produkt ska rapporteras till HR HealthCare och behörig myndighet i medlemsstaten där användaren är etablerad.
- Engångsförpackningen med EcoVue Non-Sterile Ultrasound Gel är endast avsedd för engångsanvändning. Återanvändning kan orsaka korskontaminering, risk för infektion eller negativ reaktion hos patienten.
- OBSERVERA:** Enligt federal lagstiftning får denna utrustning endast användas av eller på order av läkare eller dennes representant.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Kassera och använd inte EcoVue Sterile Ultrasound Gel om förpackningen är skadad eller öppnad.
- Kassera och använd inte EcoVue Non-Sterile Ultrasound Gel om förseglingen är skadad eller saknas (endast REF # 284).
- Det är inte tillåtet att fylla på flergångsprodukter med EcoVue Non-Sterile Ultrasound Gel (REF # 284, 286 och 386).

FÖRE ANVÄNDNING, HANDHAVANDE & INSPEKTION

- EcoVue Non-Sterile Ultrasound Gel ska inspekteras ordentligt före användning för att säkerställa att förpackningen inte är skadad eller defekt.

GELUPPVÄRMNING

EcoVue Sterile Ultrasound Gel kan användas vid rumstemperatur eller värmas upp i en ultraljudsgelvärmare oavsett förpackningsformat, såsom gelvärmaren Acclimate®. Se gelvärmarens bruksanvisning/ användarmanual från tillverkaren för uppvärmningsinstruktioner.

STEGVISA ANVISNINGAR

Engångsförpackning (REF. # 281, 283, 381 och 383)

- Öppna manuellt engångsförpackningen med Non-Sterile Ultrasound Gel genom att riva längs de indikerade perforeringarna.
- Lägg på önskad mängd EcoVue direkt på patienten eller sonden efter behov.
- Kassera paketet efter användning.

Flergångsprodukter (REF. # 284, 286 och 386)

- Ta bort förseglingen och sätt tillbaka locket (endast REF # 284).
- Lägg på önskad mängd EcoVue direkt på patienten eller sonden efter behov. För att undvika kontaminering ska spetsen av behållaren inte komma i kontakt med patient, medarbetare eller instrument.
- Stäng locket och förvara på lämplig plats. Kassera behållaren när den är tom (eller tidigare om anläggningens interna regler kräver detta).

REKOMMENDERADE FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Förvara på en ren, torr plats vid rumstemperatur och borta från direkt solljus.



HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com



Emerge Europe
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Anhem
The Netherlands



Imaging Solutions Pty Ltd
PO Box 3225 Loganholme DC,
QLD, 4129
Australia



Nissha Medical Technologies Ltd
Torbay Business Park, Woodview Rd.
Paignton, Devon, TQ4 7HP

Nissha Medical Technologies SAS
23-25 Boulevard de la Paix
95800 Cergy, France

ENGÅNGSFÖRPACKNING



FLERGÅNGSPRODUKTER



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, EcoVue, FlexPac och Acclimate är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HR HealthCare. © 2018-2025 HR HealthCare. Alla rättigheter reserverade.

LBL-0120-SV Rev. 0 (04/2025)