

TruCath®

Catéter Uretral Intermitente de Caucho Rojo

es

Instrucciones de uso

INDICACIÓN DE USO

El catéter uretral intermitente de caucho rojo está diseñado para usarse en el drenaje de líquido del tracto urinario.

AVISO

- No use ungüentos o lubricantes a base de petróleo en el catéter, esto podría dañar el látex.
- Después del uso, este producto puede ser un potencial agente bio-peligroso.
- Maneje y deseche de acuerdo con las regulaciones y leyes locales, estatales y federales.

PRECAUCIÓN

- Este producto contiene látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas.
- El reuso puede causar infecciones y reacciones alérgicas.
- Estéril, a menos que el empaque este abierto o dañado.
- No aspire orina a través de las paredes de drenaje del embudo.
- Solo para uso UROLOGICO.
- Evite la congelación y el calor excesivo.

INSTRUCCIONES DETALLADAS

Uso de una técnica aséptica para extraer el catéter del envase.

1. Inspeccione el catéter antes de utilizarlo. No utilice el producto si el dispositivo o el embalaje están dañados. Conecte la sonda a una bolsa de orina u otro dispositivo colector si es necesario.

2. **Hombres** - Levante el pene con una mano para enderezar la uretra. Utilice la otra mano para introducir la sonda en la uretra unos 2 cm cada vez.

Mujeres - Separe los labios con una mano para exponer el orificio uretral. Utilice la otra mano para introducir la sonda suavemente en la uretra, unos 2 cm cada vez.


Continúe introduciendo la sonda en la uretra hasta que la orina comience a fluir.

3. Cuando la orina deje de fluir, saque la sonda de 2 a 3 cm. Si el flujo de orina se reanuda, espere unos segundos antes de sacar la sonda otros 1 o 2 cm. Cuando la vejiga esté completamente vacía, retire lentamente la sonda.

El producto está destinado a un solo uso y debe desecharse según las directrices locales de desecho de residuos infecciosos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- La sequedad, la ventilación, evitar la luz, evitar el sobreenfriamiento y el sobrecalentamiento en el almacenamiento y el transporte.
- Antes de su uso, el catéter debe colocarse en la bolsa de embalaje original.

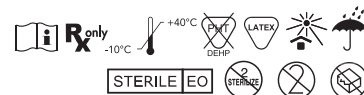

hrhealthcare.com/symbolsglossary

Fabricado para: HR HealthCare | 2600 Eastern Blvd., Ste. 201
York, PA 17402 EE. UU. | hrhealthcare.com

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, y TruCath son marcas
comerciales o marcas registradas de of HR HealthCare.
©2024 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

LBL-0105 Rev. 0 (11/2024)

HR HealthCare