

Materiales elegidos teniendo en cuenta su seguridad

Los catéteres TruCath Oasis **no están fabricados con goma de látex natural, DEHP, BPA ni ningún otro ftalato**, lo que reduce los riesgos de alergia y la exposición a sustancias químicas.

Manipulación sin contacto y protección

La funda TruProtect® promueve una buena técnica, ya que minimiza el contacto con la sonda del catéter. Su diseño grande, angular y alargado evita que gire sobre superficies estériles, **reduce el riesgo de contaminación y ayuda a lograr una inserción controlada e higiénica.**

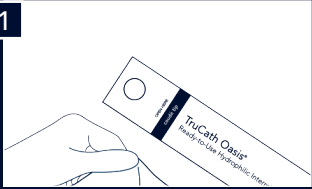
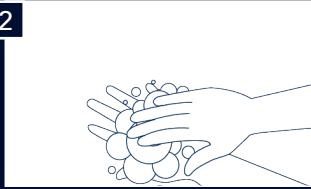

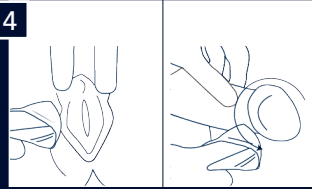
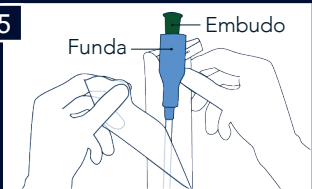
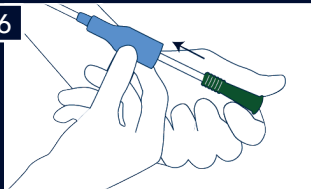
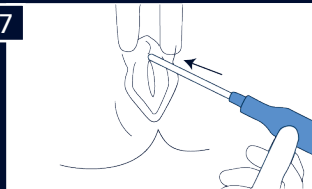
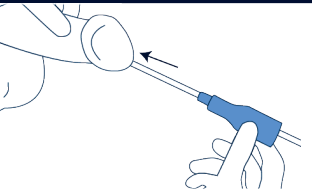
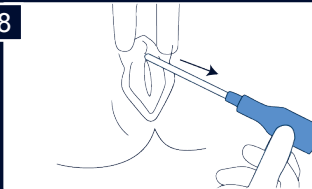
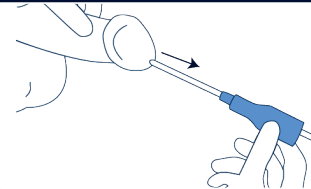
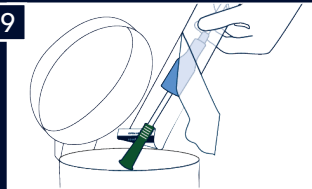

Tecnología hidrofílica para un cómodo uso

El recubrimiento hidrofílico del catéter ayuda a crear una superficie suave de baja fricción para una mayor comodidad durante la inserción y la extracción. El recubrimiento está adherido a la superficie del catéter para proporcionar **una sensación sedosa y resbaladiza constante** a lo largo de todo del catéter.

Los ojos (pequeños orificios de drenaje cerca de la punta) permiten el flujo de orina desde la vejiga hasta el interior del catéter. Están pulidos por calor para crear una superficie sin irregularidades.

INSTRUCCIONES DE USO

Autocateterismo con TruCath Oasis

PREPARACIÓN	1		2		3		4		
		Ensamble el equipo. Revise los paquetes. Si alguno de ellos está dañado, deséchelo y reemplácelo.		Higienícese las manos (lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol).		Busque una posición cómoda.		Lávese los genitales con agua y jabón, jabón antibacteriano o toallas húmedas sin alcohol si es el primer cateterismo del día o si el cateterismo se realizará después de una evacuación.	
	INSERCIÓN	5		6		7			
			Abra el paquete y saque el embudo.		Mientras sostiene el embudo, deslice la funda TruProtect por el catéter hacia la punta.		Con cuidado, inserte el catéter en el orificio uretral*. Haga avanzar el catéter hacia la vejiga. Deténgase cuando comience el flujo de orina.		
EXTRACCIÓN	8				9		10		
		Cuando finalice el flujo de orina, comience a extraer el catéter. Durante la extracción, gire lentamente el catéter, deteniéndose cada vez que comience el flujo de orina, hasta vaciar la vejiga. Retire el catéter de la uretra.				Deseche el equipo usado y el paquete.		Higienícese las manos (lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol).	

* Catéteres de punta coudé

Antes de la inserción, asegúrese de que el ángulo curvo de la punta esté orientado hacia arriba. Como guía, use la línea en relieve del embudo y la línea azul de la sonda para orientar el catéter hacia arriba. Siempre preste atención al ángulo de la punta para la colocación.

Un catéter que está listo cuando usted está listo

El paquete fácil de abrir con un **diseño de anilla y una pestaña adhesiva** permite abrir, colgar y ubicar con facilidad el catéter donde es necesario.



Reciba los suministros en la puerta de su casa

Los Servicios para el Paciente de HR HealthCare combinan los productos de HR HealthCare con servicios de suministro para ofrecer una experiencia más personalizada y fluida. Administramos y orientamos el proceso de cobertura, ofrecemos asesoramiento sobre los productos y nos ocupamos de la gestión de suministros para cubrir sus necesidades de cateterismo intermitente.

El apoyo de los Servicios para el Paciente incluye lo siguiente:

- Administración de la cobertura de los suministros (seguros y planes).
- Pedidos, entregas, seguimiento y repetición de pedidos para garantizar que tenga los productos cuando los necesita.
- Información básica sobre el cateterismo intermitente, la selección de productos, las prácticas recomendadas, las guías de uso de rutina y los protocolos de reducción de riesgos de infecciones de las vías urinarias.

Para obtener más información sobre los catéteres hidrofílicos listos para usar TruCath Oasis o recibir ayuda con los suministros, comuníquese con HR HealthCare:

Atención al Cliente: 800.985.9048 | customercare@hrhealthcare.com

Servicios para el Paciente: 877.424.2562 | patientservices@hrhealthcare.com



La información proporcionada es únicamente para fines informativos y educativos, y no debe considerarse un consejo médico ni una recomendación de tratamiento. Siempre siga las indicaciones del profesional de atención médica y las instrucciones de uso (IFU) del producto para garantizar un uso seguro. Escanee el código QR o visite el sitio web de HR HealthCare para obtener información adicional: <https://www.hrhealthcare.com/instructions-for-use-safety-data-sheets-resources/>

HR HealthCare, el logotipo de HR HealthCare, TruCath Oasis y TruProtect son marcas comerciales o marcas registradas de HR HealthCare.
© 2026 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.
LBL-0166-ES Rev. 0 (04/2026)