

# Materiales elegidos teniendo en cuenta su seguridad

Los catéteres TruCath Swift **no están fabricados con goma de látex natural, DEHP, BPA ni ningún otro ftalato**, lo que reduce los riesgos de alergia y la exposición a sustancias químicas.

## Manipulación sin contacto y protección

La funda TruProtect® promueve una buena técnica, ya que minimiza el contacto con la sonda del catéter. Su diseño grande, angular y alargado evita que gire sobre superficies estériles, **reduce el riesgo de contaminación y ayuda a lograr una inserción controlada e higiénica.**

## Más comodidad, menos complicaciones

Al estar previamente recubierto con un gel lubricante, ahorra un paso de la preparación y evita el desecho de otros paquetes en comparación con los catéteres tradicionales sin recubrimiento. Cuenta con un recubrimiento generoso y uniforme que abarca toda la longitud del catéter; además, la funda TruProtect tiene gel adicional para ofrecer una distribución individualizada. La lubricación previa está diseñada con el fin de brindar **una sensación constante de suavidad** en toda la superficie del catéter y así ofrecer mayor comodidad durante la inserción y la extracción.

Los ojos (pequeños orificios de drenaje cerca de la punta) permiten el flujo de orina desde la vejiga hasta el interior del catéter. Están pulidos por calor para crear una superficie sin irregularidades.

## INSTRUCCIONES DE USO

## Autocateterismo con TruCath Swift

PREPARACIÓN	1		2		3		4	
	5		6		7		8	
	9		10					

\* Catéteres de punta coudé

Antes de la inserción, asegúrese de que el ángulo curvo de la punta esté orientado hacia arriba. Como guía, use la línea en relieve del embudo y la línea azul de la sonda para orientar el catéter hacia arriba. Siempre preste atención al ángulo de la punta para la colocación.

Los catéteres prelubricados listos para usar TruCath Swift® están recubiertos con un **lubricante de uso médico a base de agua** para el cateterismo intermitente. Listo para usar directamente del paquete: no se requiere activación con agua ni la aplicación de otro lubricante.

# Comodidad lista para usar



## Reciba los suministros en la puerta de su casa

Los Servicios para el Paciente de HR HealthCare combinan los productos de HR HealthCare con servicios de suministro para ofrecer una experiencia más personalizada y fluida. Administramos y orientamos el proceso de cobertura, ofrecemos asesoramiento sobre los productos y nos ocupamos de la gestión de suministros para cubrir sus necesidades de cateterismo intermitente.

El apoyo de los Servicios para el Paciente incluye lo siguiente:

- Administración de la cobertura de los suministros (seguros y planes).
- Pedidos, entregas, seguimiento y repetición de pedidos para garantizar que tenga los productos cuando los necesita.
- Información básica sobre el cateterismo intermitente, la selección de productos, las prácticas recomendadas, las guías de uso de rutina y los protocolos de reducción de riesgos de infecciones de las vías urinarias.

Para obtener más información sobre los catéteres prelubricados listos para usar TruCath Swift o recibir ayuda con los suministros, comuníquese con HR HealthCare:

**Atención al Cliente:** 800.985.9048 | [customercare@hrhealthcare.com](mailto:customercare@hrhealthcare.com)

**Servicios para el Paciente:** 877.424.2562 | [patientservices@hrhealthcare.com](mailto:patientservices@hrhealthcare.com)



La información proporcionada es únicamente para fines informativos y educativos, y no debe considerarse un consejo médico ni una recomendación de tratamiento. Siempre siga las indicaciones del profesional de atención médica y las instrucciones de uso (IFU) del producto para garantizar un uso seguro. Escanee el código QR o visite el sitio web de HR HealthCare para obtener información adicional: <https://www.hrhealthcare.com/instructions-for-use-safety-data-sheets-resources/>

HR HealthCare, el logotipo de HR HealthCare, TruCath Swift y TruProtect son marcas comerciales o marcas registradas de HR HealthCare.  
© 2026 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.  
LBL-0167-ES Rev. 0 (04/2026)