

Instrucciones de uso

REF Descripción

LIV08	8 Fr
LIV10	10 Fr
LIV12	12 Fr
LIV14	14 Fr

INDICACIONES DE USO

El catéter intermitente prelubricado Liv™ es un dispositivo destinado a pacientes del sexo femenino que se inserta por la uretra para drenar la orina de la vejiga.

CONTRAINDICACIONES

- No se conoce ninguna.

ADVERTENCIAS

- No use el catéter si la punta introductora se desprende al retirar la tapa. Esto puede aumentar el riesgo de infección de las vías urinarias (IVU), ya que la punta está diseñada para proteger el catéter de los posibles agentes patógenos.
- No vuelva a esterilizar ninguna parte de este dispositivo.
- No lo reutilice. Está diseñado para un solo uso.
- Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo se debe informar al fabricante.
- Si presenta molestias o signos de traumatismo, suspenda de inmediato el uso y consulte a un profesional de atención médica.


PRECAUCIONES

- No use el producto si el paquete está abierto, dañado o defectuoso.

REACCIONES ADVERSAS

No se conoce ninguna.


COMPONENTES DEL CATÉTER

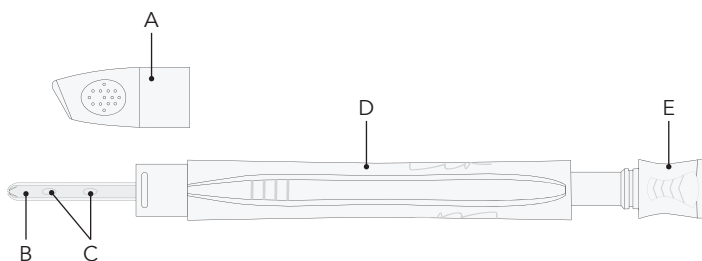

- | | |
|------------------------------------|--|
| A. Tapa | D. Cuerpo |
| B. Punta introductora prelubricada | E. Varilla de empuje/abertura de drenaje |
| C. Ojos del catéter | |

INSTRUCCIONES PASO A PASO


1. Reúna los suministros para el cateterismo según las indicaciones del profesional de atención médica.

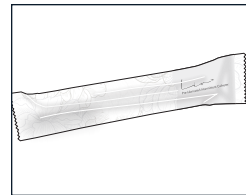

2. Higienícese las manos (lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol) de acuerdo con las indicaciones del profesional de atención médica.



3. Póngase guantes, si corresponde.

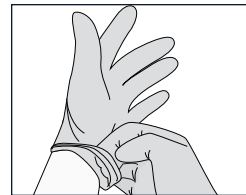


4. Acomódese para el cateterismo y quítese la ropa, según sea necesario, para tener acceso a los genitales.



5. Higienice la abertura uretral (meato) y la zona que la rodea según las indicaciones del profesional de atención médica.




6. Retire el catéter del paquete; para ello, jale suavemente hacia abajo desde borde en zigzag que se encuentra en cualquiera de los extremos del envoltorio.

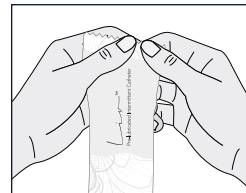

7. Prepare el catéter:


- Jale suavemente la varilla de empuje desde el cuerpo del catéter hasta que el catéter se active.

IMPORTANTE: No jale la varilla de empuje con fuerza. Si la varilla de empuje se sale del cuerpo del catéter, deseché todo el producto y use uno nuevo.

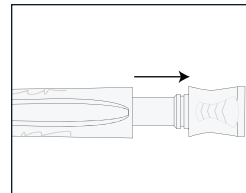


- Retire la tapa para dejar la punta introductora al descubierto.


IMPORTANTE: Asegúrese de que la sonda del catéter esté dentro de la punta introductora y no se salga por la abertura. Si eso sucede, deseché todo el producto y use uno nuevo. No intente insertar el catéter sin la punta introductora. Además, procure no tocar la punta introductora con los dedos y evitar el contacto con cualquier superficie, ya que esto comprometerá la esterilidad.

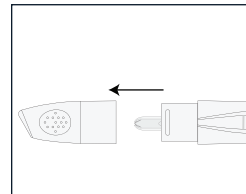

8. Con la mano menos hábil, mantenga separada la parte interna de los labios vaginales. Con la mano hábil, inserte la punta introductora en el meato urinario. Siga sosteniendo el catéter con la mano hábil.

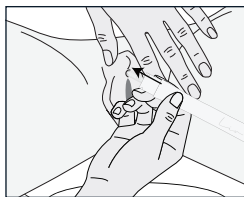


9. Suelte los genitales y use la mano menos hábil para sostener los lados de la varilla de empuje (procure no cubrir la abertura de drenaje en la parte inferior de la varilla de empuje). Luego, empuje suavemente la varilla para introducir el catéter en la uretra. Siga introduciendo el catéter hasta que llegue a la vejiga y comience el flujo de orina.

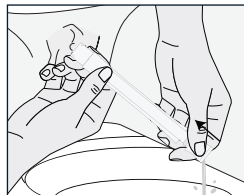

10. Cuando se complete el flujo de orina, suavemente y con cuidado, retire la punta introductora y el catéter de la uretra.



11. Deseche el catéter y los suministros utilizados en un bote de basura o de conformidad con el procedimiento de las instalaciones para uso clínico.

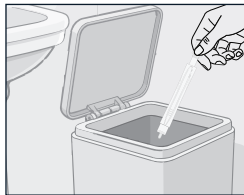

12. Higienícese las manos (lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol).



ALMACENAMIENTO

Guarde los productos en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente.



hrhealthcare.com/symbolsglossary

Fabricado por: HR HealthCare | 2600 Eastern Blvd., Ste. 201 | York, PA 17402 USA | hrhealthcare.com

HR HealthCare, el logotipo de HR HealthCare y LIV son marcas comerciales de HR HealthCare.

© 2026 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

U.S. Pat. No. D1,031,976 S

Fabricado en CN LBL-0165-ES Rev. 0 (08/2026)